




Ideen für die Füße

Schritt für Schritt

Anleitungen / Schnittmuster

für Diabetologie und Podologie

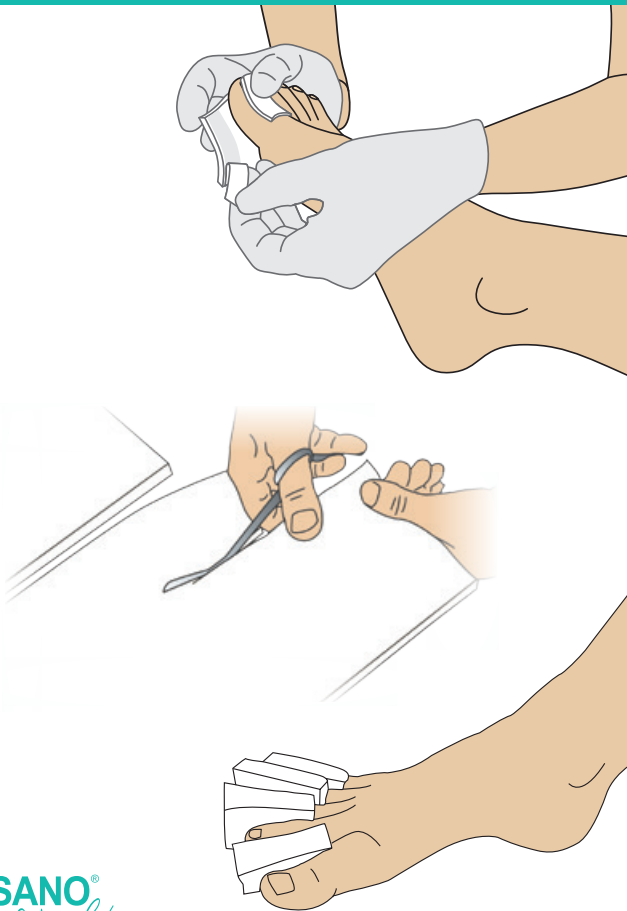

LIGASANO®
wird einfach

Bitte beachten:

Wie und womit schneide ich?

LIGASANO® kann mit einer Schere beliebig zugeschnitten werden.

Wie lange sind die Produkte verwendbar?

LIGASANO® weiß muss nach **spätestens drei Tagen** ausgetauscht werden, da der mechanische Reiz nach ca. dreitägiger Anwendung verloren geht und das Material sich dauerhaft verformt.

LIGASANO® grün und LIGASANO® orange sind (zur Druckentlastung) je nach Belastung bis zu mehreren Wochen verwendbar.

LIGASANO® grün, LIGASANO® orange und LIGASANO® weiß sind luftdurchlässig und sorgen so für ein optimales Mikroklima.

LIGASANO® grün sollte bei der Anwendung zur Druckentlastung keinen direkten Hautkontakt haben

Sind die Produkte wiederverwendbar?

LIGASANO® weiß unsteril ist ein Einmalprodukt und daher auch nicht wiederverwendbar.

LIGASANO® grün unsteril und LIGASANO® orange unsteril sind Einmalprodukte, können bei ausschließlicher Anwendung zur Druckentlastung jedoch oft wochenlang verwendet werden. **LIGASANO® grün unsteril und LIGASANO® orange unsteril** sind bei dieser Anwendungsart waschbar*.

Sind die Produkte waschbar?

LIGASANO® weiß unsteril ist ein Einmalprodukt und daher auch nicht waschbar. Es verliert nach einer Wäsche den Großteil seiner Eigenschaften.

LIGASANO® grün unsteril und LIGASANO® orange unsteril sind Einmalprodukte, können bei ausschließlicher Anwendung zur Druckentlastung jedoch oft wochenlang verwendet und auch bei maximal 95 °C gewaschen werden*.

* Die Aufbereitung und Wiederverwendung geschieht auf Verantwortung des Anwenders. Beachten Sie dabei bitte die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten.

Wie muss LIGASANO® aufbewahrt werden?

LIGASANO® immer in der Originalverpackung und vor Nässe und Licht geschützt aufbewahren.



Bitte lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Gebrauchsanleitung, welche jeder Originalpackung beiliegt!

Wundreinigung

Je nach Art und Menge der Beläge haben Sie drei verschiedene Wundputzer® zur Auswahl, besonders sinnvoll kann eine Kombination sein. Durch Anwendung der **Drehtechnik** (Drehbewegung um 180°) und/oder der **Wischtechnik** (Auswischen in nur eine Richtung) erhält man mit den sterilen LIGASANO® Wundputzern® ein optimales Reinigungsergebnis.



LIGASANO® Wundputzer® intensiv

Entfernt sehr hartnäckige, zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, kann sehr viel Detritus aufnehmen.

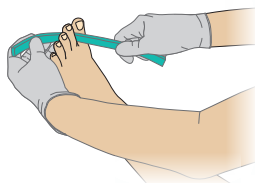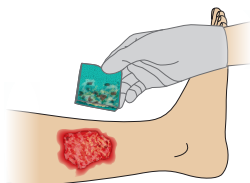



LIGASANO® Wundputzer® medium

Entfernt relativ zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, kann viel Detritus aufnehmen.

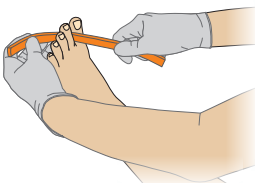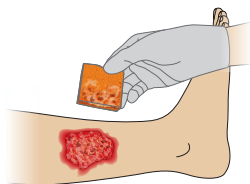

Schritt für Schritt

LIGASANO® Wundputzer® soft
Entfernt weiche Beläge und Biofilm.

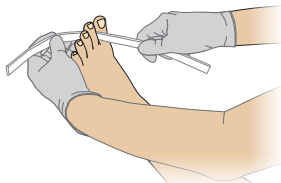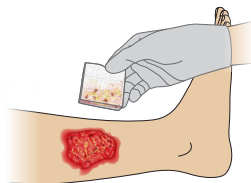

Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	Wundputzer® intensiv STERIL ●	5 x 5 x 2 cm	16814-010 / 16814-030
1 Stück	Wundputzer® intensiv Cavity/interdigital STERIL ●	30 x 1,5 x 0,6 cm	16812-010 / 16812-028
1 Stück	Wundputzer® medium STERIL ●	5 x 5 x 2 cm	36814-010 / 36814-030
1 Stück	Wundputzer® medium Cavity/interdigital STERIL ●	30 x 1,5 x 0,6 cm	36812-010 / 36812-028
1 Stück	Wundputzer® soft STERIL ○	5 x 5 x 2 cm	15342-010 / 15342-030
1 Stück	Wundputzer® soft Cavity/interdigital STERIL ○	50 x 1,5 x 0,4 cm	15372-010 / 15372-028

Wundbehandlung

Wundversorgung bei Malum perforans:



Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL	15 x 10 x 1 cm	15351-010 / 15351-020 / 15351-140

Schritt für Schritt

Wundversorgung bei Malum perforans:



Wundreinigung

Wundbehandlung

Druckentlastung/-schutz

Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL	○	5 x 5 x 1 cm 15341-010 / 15341-040

Wundbehandlung

Wundversorgung bei postoperativen Wunden:




Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL	6 x 2,5 x 0,4 cm	15375-010 / 15375-060
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL	5 x 5 x 1 cm	15341-010 / 15341-040

Schritt für Schritt

Wundversorgung und Druckentlastung bei Malum perforans:








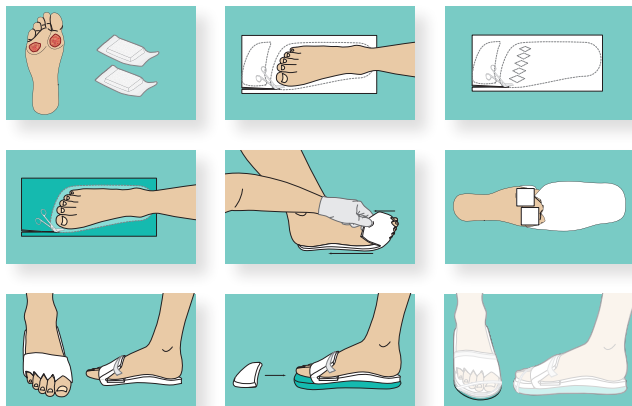


Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL ○	5 x 5 x 1 cm	15341-010 / 15341-040
1 Stück	LIGASANO® Diabetes-Plantarverband oder LIGASANO® Roll weiß + LIGASANO® Roll grün ● ○	35 x 15 x 1/2 cm 200 x 11 x 1 cm 200 x 11 x 1 cm	15098-007 15110-001 16110-001
1 Stück	LIGAMED® ^{flx}	Einheitsgröße	10305-003

Druckentlastung

Fersenverbandspolster: Individueller Fersenschuh Variante 1

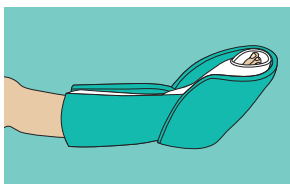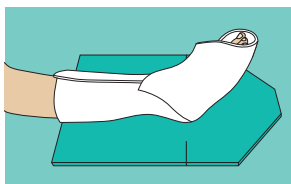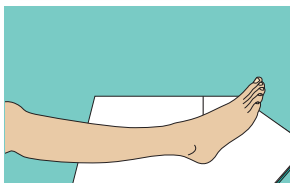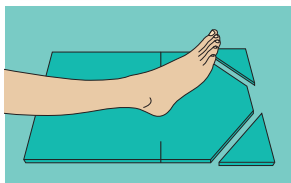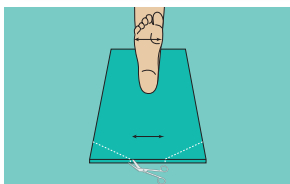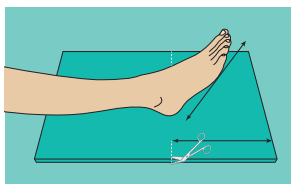
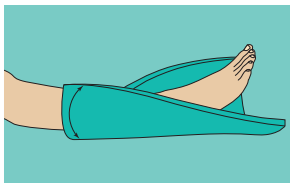
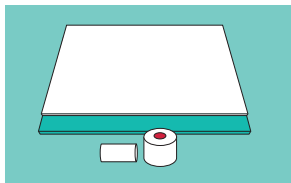


Wundreinigung

Wundbehandlung

Druckentlastung/-schutz

Schritt für Schritt

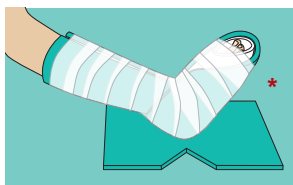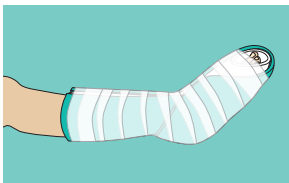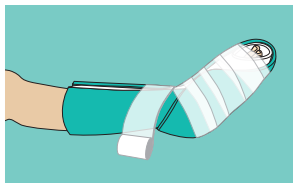

* Sollte der Patient seine Beine anziehen oder anwinkeln, muss der Fersenschuh zusätzlich aufgepolstert werden, da extreme Hebelwirkungen bzw. Druck auf das Fersenbein einwirken.

Wundreinigung

Wundbehandlung




Druckentlastung/-schutz

Materialbedarf:

Bedarf	Material		Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß	○	59 x 49 x 1 cm	12002-004 / 12002-014
1 Stück	LIGASANO® grün	●	55 x 45 x 2 cm	16001-002 / 16001-007
1 Stück	LIGASANO® weiß	○	300 x 10 x 0,3 cm	15573-006
1 Stück	LIGAMED® fix		Einheitsgröße	10305-003



Druckentlastung

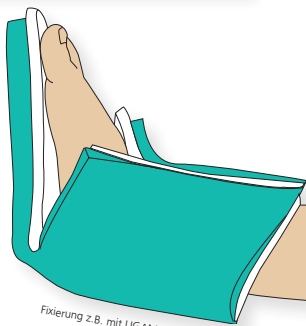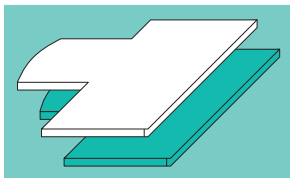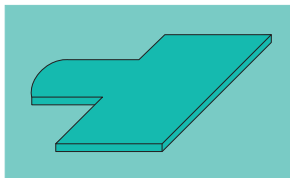Fersenverbandpolster: Individueller Fersenschuh Variante 2



Fixierung z.B. mit LIGAMED®fix

Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß 	59 x 49 x 1 cm	12002-004 / 12002-014
1 Stück	LIGASANO® grün 	55 x 45 x 2 cm	16001-002 / 16001-007
1 Stück	LIGAMED®fix	Einheitsgröße	10305-003

Schritt für Schritt

oder bereits vorgefertigt als Hilfsmittel
(jeweils HM-Nr. 11.11.05.0021)



Fersenschuh Plus
Art. 32211-001



Fersenschuh
Art. 32210-001

Der original LIGAMED® Fersenschuh + LIGASANO® weiß in 1 cm Dicke sind eine ideale Kombination. So nutzen Sie die therapeutische Wirkung von LIGASANO® weiß und der Fersenschuh bleibt länger sauber - das spart Zeit und Geld.



Wundreinigung



Wundbehandlung

Druckentlastung/-schutz

Druckentlastung

Fersenverbandpolster: Fersenkappe Variante 1

z.B. bei Rhagaden

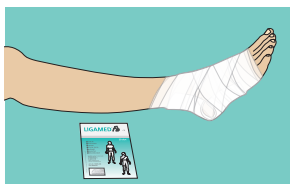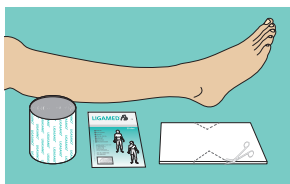





Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	24 x 16 x 2 cm	15153-005
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	300 x 10 x 0,3 cm	15573-006
1 Stück	LIGAMED® fix	Einheitsgröße	10305-003

Schritt für Schritt

Fersenverbandpolster: Fersenkappe Variante 2

z.B. bei Fersensporn.

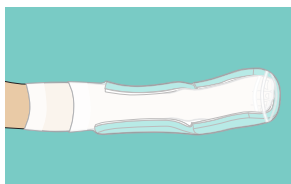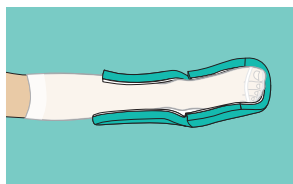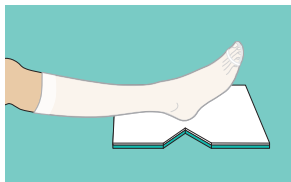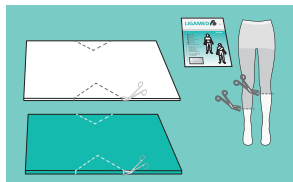

LIGASANO® grün kann zur Entlastung unter dem Schmerzpunkt ausgeschnitten werden

Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	59 x 49 x 1 cm	12002-004 / 12002-014
1 Stück	LIGASANO® grün ●	55 x 45 x 2 cm	16001-002 / 16001-007
1 Stück	LIGASANO® weiß ○	300 x 10 x 0,3 cm	15573-006
1 Stück	LIGAMED® <i>fl</i>	Einheitsgröße	10305-003

Wundreinigung

Wundbehandlung

Druckentlastung/-schutz

Druckentlastung

Fersenverbandpolster:

Zur Behandlung und / oder Prävention von Fersenläsionen

Wundreinigung

Wundbehandlung



Applikationstechniken:

Bei **überwiegend bettlägerigen** Patienten bringen Sie bitte die Überlappung an der Rückseite der Ferse an.

Bei **überwiegend sitzenden oder stehenden** Patienten muss die Überlappung plantarseitig angebracht werden.



Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL	Ø 20 cm	15330-010
1 Stück	LIGASANO® weiß	Ø 20 cm	15030-010
1 Stück	LIGAMED®/ix oder LIGASANO® Binde	Einheitsgröße 300 x 10 x 0,3 cm 300 x 5 x 0,3 cm	10305-003 15573-006 15571-012

Druckentlastung/-schutz

Schritt für Schritt



Wundreinigung





Wundbehandlung


Druckentlastung/-schutz

Druckentlastung

Verbandpolster: Druckschutz bei Hallux valgus

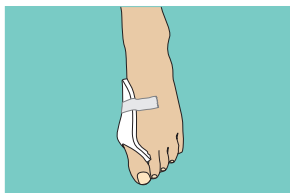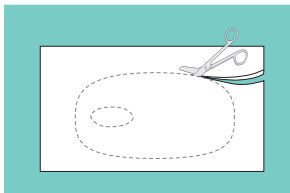


Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß 	59 x 49 x 2 cm oder 59 x 49 x 1 cm oder 15 x 10 x 2 cm oder 15 x 10 x 1 cm	12001-002 / 12001-007 12002-004 / 12002-014 15158-013 / 15008-104 15159-026 / 15009-208


Schritt für Schritt

Druckschutz mit vorgefertigtem Hallux-valgus-Verband aus LIGASANO® weiß

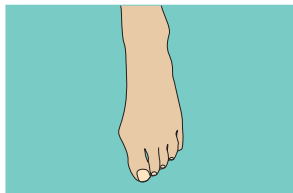


Alternativ kann man damit die Außenkante des Fußes schützen, dazu muss der Verband aber der Länge nach aufgeschnitten werden.

Materialbedarf:


Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1-2 Stück	LIGASANO® weiß Hallux valgus Verband 	4,5/4,0 x 12 cm	15075-006 / 15075-024

Bei Hautdefekten bitte unbedingt die sterile Ausführung verwenden!

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1-2 Stück steril	LIGASANO® weiß Hallux valgus Verband 	4,5/4,0 x 12 cm	15395-004

Druckschutz

Herstellung eines Zehenverbandes:


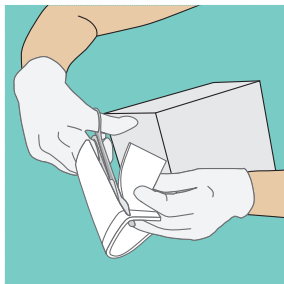


Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
8-10 cm	LIGASANO® weiß Zehenverband ○	200 x 14 x 0,5 cm	15215-001

Schritt für Schritt

Herstellung eines Zehenkappenverbandes:

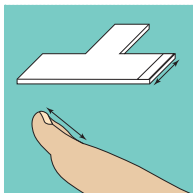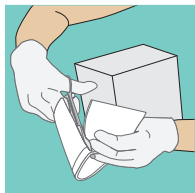

Wundreinigung

Wundbehandlung






Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
8-10 cm	LIGASANO® weiß Zehenverband	○ 200 x 14 x 0,5 cm	15215-001

Druckentlastung/-schutz

Druckschutz

Unterpolsterung bei Unguis incarnatus

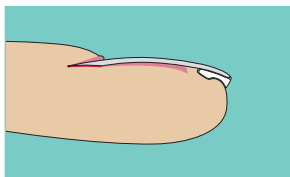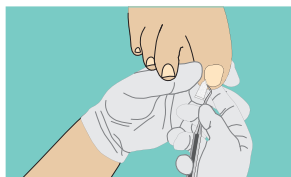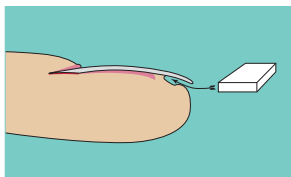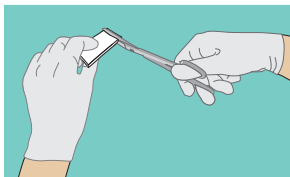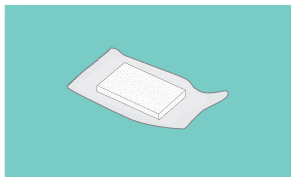

Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL ○	6 x 2,5 x 0,4 cm	15375-010 / 15375-060

Schritt für Schritt

Unterpolsterung bei Behandlung mit Spangentechnik (3TO)



Wundreinigung

Wundbehandlung

Bitte beachten:

LIGASANO® darf nur unter den Nagel geschoben werden, nicht in den Falz, da ansonsten zu viel Druck im Nagelfalz entstehen kann.



Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß STERIL	○	6 x 2,5 x 0,4 cm
			15375-010 / 15375-060

Druckentlastung/-schutz

Druckentlastung

Vermeidung von Haut-Haut-Kontakt als Vorbeugung oder Therapie von Intertrigo:

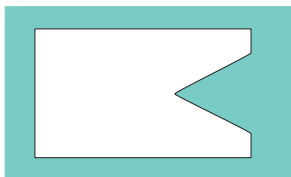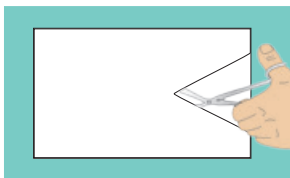


Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß oder LIGASANO® Roll 200 x 11 x 1 cm	15 x 10 x 1 cm Benötigte Menge von der Rolle ab- schneiden	15158-013 / 15008-104 oder 15110-001
1 Stück	LIGAMED® fix	Einheitsgröße	10305-003


Schritt für Schritt

Druckentlastung durch Druckverteilung, Druck- und Reibeschutz, Intertrigo-Therapie:

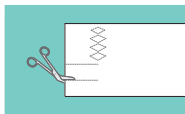

Fixierung mit **LIGAMED® fix**. Falls erforderlich, kann zusätzlich mit einer Lage **LIGASANO® weiß** oder **LIGASANO® grün** unterpolstert werden, z.B. mit dem Diabetes-Plantarverband (Art. 15098-007).

Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß 	59 x 49 x 1 cm	12002-004 / 12002-014
1 Stück	LIGAMED® fix	Einheitsgröße	10305-003




Wundreinigung

Wundbehandlung

Druckentlastung/-schutz

Druckentlastung


Druck- und Reibungsschutz bei Hammer- und Krallenzehen:

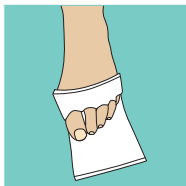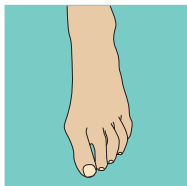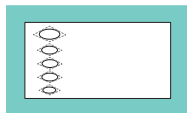

Fixierung mit LIGAMED® fix. Alternativ kann auch der Hammerzeheverband (Art. 15078-012) verwendet werden.




Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel
1 Stück	LIGASANO® weiß 	59 x 49 x 1 cm oder Ø 2,5 x 12 cm	12002-004 / 12002-014 oder 15078-012

Schritt für Schritt

Platzhalter nach Amputationen:

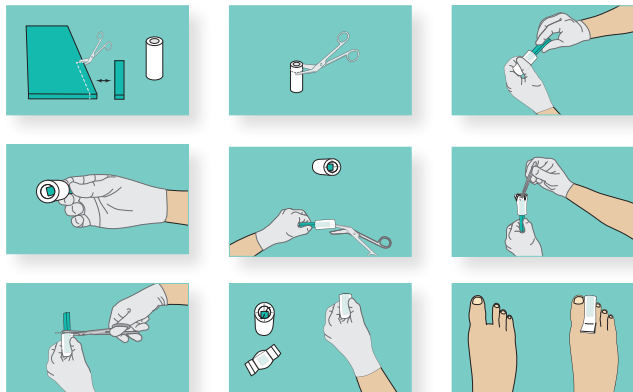

Fixierung mit **LIGAMED® fix.**

Materialbedarf:

Bedarf	Material	Größe	Mögliche Artikel	
1 Stück	LIGASANO® weiß Zehenschlauch	○	Ø 3,5 oder 2,5 cm	15070-012
1 Stück	LIGASANO® grün	●	55 x 45 x 2 cm oder 200 x 11 x 1 cm	16001-002 oder 16110-001

Produktübersicht (Auswahl)



Art.-Nr. PZN Versandeinheit

LIGASANO® Wundputzer® steril

16814-010	17251841	10 Stck.	5 x	5 x	2 cm	intensiv	steril	●	
16814-015	17251858	15 Stck.	5 x	5 x	2 cm	intensiv	steril	●	
16814-030	17251864	30 Stck.	5 x	5 x	2 cm	intensiv	steril	●	
16812-010	17251829	10 Stck.	30 x	1,5 x	0,6 cm	intensiv	steril	●	
16812-028	17251835	28 Stck.	30 x	1,5 x	0,6 cm	intensiv	steril	●	
36814-010	17252071	10 Stck.	5 x	5 x	2 cm	medium	steril	●	
36814-015	17252088	15 Stck.	5 x	5 x	2 cm	medium	steril	●	
36814-030	17252094	30 Stck.	5 x	5 x	2 cm	medium	steril	●	
36812-010	17252042	10 Stck.	30 x	1,5 x	0,6 cm	medium	steril	●	
36812-028	17252059	28 Stck.	30 x	1,5 x	0,6 cm	medium	steril	●	
15342-010	17251261	10 Stck.	5 x	5 x	2 cm	soft	steril	○	
15342-015	17251278	15 Stck.	5 x	5 x	2 cm	soft	steril	○	
15342-030	17251284	30 Stck.	5 x	5 x	2 cm	soft	steril	○	
15372-010	17251545	10 Stck.	50 x	1,5 x	0,4 cm	soft	steril	○	
15372-028	17251551	28 Stck.	50 x	1,5 x	0,4 cm	soft	steril	○	
36815-005	17252125	Originalpackung mit 5 Peelpack bestehend aus jeweils							
		1 Stck.	5 x	5 x	2 cm	intensiv	steril	●	
		1 Stck.	5 x	5 x	2 cm	medium	steril	○	
		1 Stck.	5 x	5 x	2 cm	soft	steril	●	

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® orange
- = LIGASANO® grün



LIGASANO® weiß steril

Sterile Wundauflagen und Wundeinlagen

Art.-Nr. PZN Versandeinheit

LIGASANO® weiß steril							
15341-010	17251249	10 Stck.	5 x	5 x	1 cm	weiß steril	○
15341-040	17251255	40 Stck.	5 x	5 x	1 cm	weiß steril	○
15342-010	17251261	10 Stck.	5 x	5 x	2 cm	weiß steril	○
15342-015	17251278	15 Stck.	5 x	5 x	2 cm	weiß steril	○
15342-030	17251284	30 Stck.	5 x	5 x	2 cm	weiß steril	○
15346-010	17251290	10 Stck.	10 x	10 x	1 cm	weiß steril	○
15346-020	17251309	20 Stck.	10 x	10 x	1 cm	weiß steril	○
15347-010	17251321	10 Stck.	10 x	10 x	2 cm	weiß steril	○
15350-015	17251338	15 Stck.	15 x	10 x	0,5 cm	weiß steril	○
15350-030	17251344	30 Stck.	15 x	10 x	0,5 cm	weiß steril	○
15351-010	17251350	10 Stck.	15 x	10 x	1 cm	weiß steril	○
15351-020	17251367	20 Stck.	15 x	10 x	1 cm	weiß steril	○
15356-010	17251456	10 Stck.	15 x	10 x	2 cm	weiß steril	○
15371-007	17251516	7 Stck.	100 x	1,5 x	0,4 cm	weiß steril	○
15371-014	17251522	14 Stck.	100 x	1,5 x	0,4 cm	weiß steril	○
15371-028	17251539	28 Stck.	100 x	1,5 x	0,4 cm	weiß steril	○
15372-010	17251545	10 Stck.	50 x	1,5 x	0,4 cm	weiß steril	○
15372-028	17251551	28 Stck.	50 x	1,5 x	0,4 cm	weiß steril	○
15375-010	17251568	10 Stck.	6 x	2,5 x	0,4 cm	weiß steril	○
15375-060	17251574	60 Stck.	6 x	2,5 x	0,4 cm	weiß steril	○
15394-015	17251692	15 Stck.	T-Form	14 x	10 cm	weiß steril	○
15395-004	17251700	4 Stck.	∅	4,5/4,0 x	12 cm	weiß steril	○
15330-010	17251232	10 Stck.		∅ 20 x	1 cm	weiß steril	○

Produktübersicht (Auswahl)

LIGASANO® weiß unsteril

Anwendung zur

- Durchblutungsförderung der größeren Wundumgebung
- Patientenlagerung, Abpolsterung am Körper
- Intertrigo-Therapie und Prävention
- Prophylaxe und Begleitbehandlung von Pilzinfektionen



Art.-Nr. PZN Versandeinheit

LIGASANO® weiß unsteril

12001-002	17250623	2 Stck.	59 x 49 x 2 cm	weiß	○
12001-007	17250646	7 Stck.	59 x 49 x 2 cm	weiß	○
12002-004	17250669	4 Stck.	59 x 49 x 1 cm	weiß	○
12002-014	17250675	14 Stck.	59 x 49 x 1 cm	weiß	○
15152-010	17251077	10 Stck.	24 x 16 x 1 cm	weiß	○
15153-005	17251083	5 Stck.	24 x 16 x 2 cm	weiß	○
15151-010	17251060	10 Stck.	15 x 15 x 1 cm	weiß	○
15158-013	17251108	13 Stck.	15 x 10 x 2 cm	weiß	○
15008-104	17250830	104 Stck.	15 x 10 x 2 cm	weiß	○
15159-026	17251114	26 Stck.	15 x 10 x 1 cm	weiß	○
15009-208	17250847	208 Stck.	15 x 10 x 1 cm	weiß	○
15571-012	17251717	12 Stck.	300 x 5 x 0,3 cm	weiß	○
15573-006	17251746	6 Stck.	300 x 10 x 0,3 cm	weiß	○
15070-012	17250942	12 Stck.	6 x ø3,5/2,5/1,5 cm	weiß	○
15075-002	17250959	2 Stck.	12x Ø 4,5/4,0 cm	weiß	○
15075-006	17250965	6 Stck.	12x Ø 4,5/4,0 cm	weiß	○
15075-024	17250971	24 Stck.	12x Ø 4,5/4,0 cm	weiß	○
15078-012	17250988	12 Stck.	12x Ø 2,5 cm	weiß	○
15083-025	17250994	25 Stck.	Ø 3,5 x 1 cm	weiß	○
15085-036	17251002	36 Stck.	Ø 5,0 x 1 cm	weiß	○
15215-001	17251189	1 Stck.	200 x 14 x 0,5 cm	weiß, mit Kleberand	○
15030-010	17250876	10 Stck.	Ø 20 x 1 cm	weiß	○

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® orange
- = LIGASANO® grün

LIGASANO® Roll unsteril Dispenser

15050-001	17250882	1 Stck.	300 x 5,0 x 0,3 cm	weiß	○
15225-001	17251203	1 Stck.	300 x 2,5 x 0,6 cm	weiß	○
15255-001	17251226	1 Stck.	300 x 5,5 x 0,6 cm	weiß	○
15210-001	17251172	1 Stck.	300 x 11 x 0,6 cm	weiß	○
15025-001	17250853	1 Stck.	200 x 2,5 x 1 cm	weiß	○
15055-001	17250899	1 Stck.	200 x 5,5 x 1 cm	weiß	○
15110-001	17251054	1 Stck.	200 x 11 x 1 cm	weiß	○
16110-001	17251806	1 Stck.	200 x 11 x 1 cm	grün	●

LIGASANO® grün unsteril

Anwendung zur

- Wundbegleitbehandlung
- Druckentlastung
- Belüftung von Körperpartien
- Vermeidung von Wärmestau



Art.-Nr. PZN Versandeneinheit

LIGASANO® grün unsteril

16001-002	17251752	2 Stck.	55 x 45 x 2 cm	grün	●
16001-007	17251769	7 Stck.	55 x 45 x 2 cm	grün	●
16001-028	17251775	28 Stck.	55 x 45 x 2 cm	grün	●
16006-001	17251781	1 Stck.	190 x 90 x 2 cm	grün	●
16008-006	17251798	6 Stck.	190 x 45 x 2 cm	grün	●

Diabetes-Plantarverband Kombi-Pack

15098-007 17251031 7 Stck. LIGASANO® weiß und grün

LIGAMED® Fersenschuh / Fersenschuh Plus

32210-001 04678153 1 Stck. Einheitsgröße
 32211-001 16389968 1 Stck. Einheitsgröße

Fixierhilfe

10305-003 00803561 3 Stck. LIGAMED® Fixierhilfe



Ideen für die Füße

Schritt für Schritt

In Deutschland erhalten Sie unsere Produkte in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel (Sanitätshaus). Wiederverkäufer können LIGASANO® auch direkt über den Großhandel beziehen. Sollte einmal ein Artikel nicht vorrätig sein, können Sie versandkostenfrei auch direkt bei uns bestellen. Das bestellte Produkt ist dann meist am nächsten bzw. spätestens am übernächsten Werktag bei Ihnen.

Persönlich erreichen Sie uns Montag bis Donnerstag jeweils von 08.00 bis 16.00 und Freitag von 08.00 bis 13.00. Außerhalb unserer Geschäftszeiten bitten wir Sie, uns Ihre Nachricht auf Band zu sprechen oder eine E-Mail zu senden.

Gerne beliefern wir Sie auch weltweit. Die entstehenden Transportkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Da diese je nach Paketgröße, Paketgewicht und Land variieren, können wir Ihnen die tatsächlichen Kosten erst im Zusammenhang mit einer konkreten Bestellmenge mitteilen.

LIGAMED® medical Produkte GmbH


Pfannenstielstr. 2 • 90556 Cadolzburg, Deutschland

Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: info@ligamed.de

Internet: www.ligasano.com

Das Copyright für alle Texte, Zeichnungen und Abbildungen in diesem Booklet liegt bei der LIGAMED® medical Produkte GmbH in D-90556 Cadolzburg.

Schulen, Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Praxen dürfen für die eigene Anwendung bzw. für Schulungszwecke Kopien erstellen, ohne vorher die Genehmigung der LIGAMED® einzuholen.

LIGASANO®, LIGAMED®, KLIMAGITTER®, MOLTOSAN®, MOLTOMED®, CAVASAN®, Dr. Guck®, Wundputzer®, A.Pf.E.L.® and  are registered trademarks of LIGAMED® medical Produkte GmbH, Germany