

# Gebrauchsanweisung

## LIGAMED® Fersenschuh

CE

Art.-Nr. 32210-001

PZN 04678153

Hilfsmittel-Positionsnummer 11.11.05.0021

beugt Druckgeschwüren am Fuß vor



LIGASANO®, LIGAMED®, MOUTOSAN®, MOUTOMED®, CAMASAN®, KIMAGITTER®, Dr. Guddé & Wundputzer® are Trade Marks of LIGASANO® medical Produkte GmbH

**LIGASANO®**  
*wird einfach*

**LIGAMED® medical Produkte GmbH**  
Pflanzenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg  
Tel. +49-(0)9103 / 20 46 • Fax +49-(0)9103 / 27 96  
E-Mail: [info@ligamed.de](mailto:info@ligamed.de) • Internet: [www.ligasano.com](http://www.ligasano.com)

# LIGAMED® Fersenschuh

Bitte lesen Sie vor Anwendung diese Information sorgfältig!

## Zweckbestimmung:

- ▶ Druck- und Stoßschutz für den ganzen Fuß sowohl im Liegen als auch im Sitzen
- ▶ Vorbeugung gegen Pilzinfektionen und feuchte Füße
- ▶ kein Wärmestau
- ▶ reduziert Scherkräfte

## Anwendungsgebiete / Indikationen:

- ▶ Fixierung von Wundauflagen
- ▶ Wundbegleitbehandlung
- ▶ Vorbeugung gegen Druckgeschwüre am Fuß, insbesondere Ferse und Knöchel
- ▶ ideal auch für Diabetiker

## Zulässige Einsatzorte und Betriebsbedingungen:

- ▶ Klinik + Pflege
- ▶ OP-Tisch
- ▶ Untersuchungsliege
- ▶ Intensivpflege
- ▶ Allgemeine Pflege
- ▶ Pflegeheime
- ▶ Pflegedienste
- ▶ Bett, Rollstuhl, etc.
- ▶ Krankentransport
- ▶ Zuhause
- ▶ Dauertemperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C

## Montageanweisung:

- ▶ Der original LIGAMED® Fersenschuh ist sofort einsatzbereit. Das Anlegen des Fersenschuhs geht einfach und schnell. Die Fixierung erfolgt sekundenschnell mit zwei extra langen Klettverschlüssen und kann nach Belieben eingestellt werden.



Anwendentipp: Der LIGAMED® Fersenschuh und LIGASANO® weiß in 1cm Dicke sind eine ideale Kombination. So nutzen Sie die therapeutische Wirkung von LIGASANO® weiß und der Fersenschuh bleibt länger sauber. Das spart Zeit und Geld.

### Wartungshinweise:

- ▶ Wartung erfolgt mittels Reinigung bzw. Desinfektion

### Erforderliche Maßnahmen vor Wiedereinsatz:

- ▶ Vor dem Wiedereinsatz an anderen Patienten muss der Fersenschuh entsprechend unserer Vorgaben gereinigt und desinfiziert werden.

### Reinigungs- und Desinfektionshinweise:

- ▶ schmutzabweisend
- ▶ waschbar bis 95 °C mit haushaltsüblichen Waschmitteln, am besten im Wäschenetz und mit geschlossenen Klettbindern
- ▶ Desinfektion durch Kochwaschgang
- ▶ sterilisierbar mit Wasserdampf, 5 Minuten bei 134 °C
- ▶ sehr schnell trocknend
- ▶ kein Nährboden für Pilze und Bakterien
- ▶ eine Wischdesinfektion ist aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit nicht sinnvoll
- ▶ keine Desinfektionssprays verwenden
- ▶ Wiedereinsatz uneingeschränkt möglich, sofern unbeschädigt und sauber

### Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

- ▶ keine Anwendungsrisiken und Kontraindikationen bekannt, auch bei Verwendung in Betten mit Seitengittern oder Betten mit verstellbaren Liegeflächen

### Woraus besteht der original LIGAMED® Fersenschuh?

Sein Innenleben besteht aus dem in der Medizin international bewährten LIGASANO® grün (Polyurethan-Schaumverband), der Bezug aus hochfestem Polyester-Gittergewebe.

### Eigenschaften:



Der original LIGAMED® Fersenschuh ist vollkommen luftdurchlässig und federleicht. Wärme- bzw. Feuchtestau haben keine Chance, man spürt kaum dass man ihn trägt.

### Tragekomfort:

Die dreidimensionale Polsterung ist anatomisch korrekt. Das Ergebnis ist ein optimaler Schutz, keine Druckstellen, perfekte Passform (auch bei Anomalien) und hoher Tragekomfort.

### Maße:

Die Größe des Fersenschuhs beträgt L x B x H 27,5 x 9 x 18 cm.

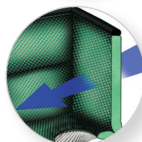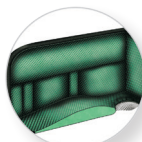

# Vertrieb

LAND	VERTRIEBSPARTNER
 Australien	LIGAMED® Australasia Pty. Ltd., P.O. Box 522, AUS-2062 Cammeray NSW Tel. +61-(0)2-98 99 16 63, Fax +61-(0)2-98 99 16 52, E-Mail: info@ligamed.com.au, Web: www.ligamed.com.au
 Belgien	HAROMED BVBA, Beukenlaan 21, B-9051 Sint-Denijs-Westrem Tel. +32-(0)9-326 05 10, Fax +32-(0)9-326 05 11 E-Mail: info@haromed.com, Web: www.haromed.com
 Deutschland	LIGAMED® medical Produkte GmbH, Pfannenstielstr. 2, D-90556 Cadolzburg Tel. +49-(0)9103-20 46, Fax +49-(0)9103-27 96 E-Mail: info@ligamed.de, Web: www.ligasano.com
 Frankreich	LIGAMED® Sini-Medik Niederreiter GmbH, Fabrikstr. 2, A-6460 Imst Tel. +43-(0)5412-61891, +33-(0)9-75180240, Fax +43-(0)5412-6189118, +33-(0)1-72703457 E-Mail: info@ligasano.fr, Web: www.ligasano.fr
 Griechenland	Navomed, Miaouli 60, GR-54642 Thessaloniki Tel. +30-(0)2310-81 00 14, Fax +30-(0)2310-81 00 14, E-Mail: voziki60@otenet.gr
 Italien	LIGAMED® Sini-Medik Niederreiter GmbH, Fabrikstr. 2, A-6460 Imst Tel. +43-(0)5412-61891, +39-(0)2-40708264, Fax +43-(0)5412-6189118, +39-(0)2-93650664 E-Mail: info@ligasano.it, Web: www.ligasano.it
 Luxemburg	HAROMED BVBA, Beukenlaan 21, B-9051 Sint-Denijs-Westrem Tel. +32-(0)9-326 05 10, Fax +32-(0)9-326 05 11 E-Mail: info@haromed.com, Web: www.haromed.com
 Österreich	LIGAMED® medical products GmbH, Öztaler Höhe 11, A-6430 Ötztal Tel. +43-(0)5266-880 99, Fax +43-(0)5266-880 99 11 E-Mail: ligamed@ligamed.at, Web: www.ligasano.at
 Rumänien	Theovita S.R.L., Suseni str. 7, RO-130169 Targoviste, Dambovita Tel. +40-(0)726-27 86 73, Fax +40-(0)345-10 30 67 E-Mail: theovita@yahoo.com
 Schweden	Hartmann ScandiCare AB, Depagatan 2, S-33421 Anderstorp Tel. +46-(0)371-58 74 00, Fax +46-(0)371-58 74 45 E-Mail: info@hartmann.se, Web: www.hartmann.se
 Schweiz	Salzmann Medico, Rorschacher Str. 304, CH-9016 St. Gallen Tel. +41-(0)71-282 12 12, Fax +41-(0)71-282 12 10 E-Mail: medico.sg@salzmann-group.ch, Web: www.salzmann-group.ch
 Slowakei	LIGAMED® medical products GmbH, Öztaler Höhe 11, A-6430 Ötztal Tel. +43-(0)5266-880 99, Fax +43-(0)5266-880 99 11 E-Mail: ligamed@ligamed.at, Web: www.ligasano.sk
 Slowenien	LIGAMED® medical products GmbH, Öztaler Höhe 11, A-6430 Ötztal Tel. +43-(0)5266-880 99, Fax +43-(0)5266-880 99 11 E-Mail: ligamed@ligamed.at, Web: www.ligasano.at
 Spanien	Servitel Marketing 2000 S.L., C/Losada Espinosa, núm. 5 (Haddu), E-51002 Ceuta Tel. +34-(0)956-619 28 34 66, Fax +34-(0)956-51 52 82, E-Mail: servitelmarketing@yahoo.es
 Südafrika	LIGAMED® S.A. (Pty) Ltd., P.O. Box 68533, ZA-Bryanston 2021 Tel. +27-(0)11-706 66 33, Fax +27-(0)11-463 52 73, E-Mail: info@ligamed.co.za, Web: www.ligamed.co.za
 Tschechische Republik	LIGAMED® medical products GmbH, Öztaler Höhe 11, A-6430 Ötztal Tel. +43-(0)5266-880 99, Fax +43-(0)5266-880 99 11 E-Mail: ligamed@ligamed.at, Web: www.ligasano.at
 Ungarn	Bend Medical Hungary Ltd., Szerémi sor 12/C, H-1117 Budapest Tel. +36-(0)1-784 12 60, Fax +36-(0)1-784 12 61 E-Mail: info@bendmedical.hu, Web: www.bendmedical.hu

## In Deutschland und allen oben nicht genannten Ländern:

LIGAMED® medical Produkte GmbH • Pfannenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg

Tel. +49 (0)9103 / 2046 • Fax +49 (0)9103 / 2796

E-Mail: info@ligamed.de • Internet: www.ligasano.com