

Produkte

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® orange
- = LIGASANO® grün

Verordnung

LIGASANO® Produktfamilie

Kurzinfo

Art.-Nr.	PZN	Versandeinheit
----------	-----	----------------

LIGASANO® Wundputzer®

16814-030	05024301	30 Stück 5 x 5 x 2 cm steril	○
16815-010	15379554	10 Stück 15 x 5 x 0,6 cm steril	○
36814-030	11644700	30 Stück 5 x 5 x 2 cm steril	●
15342-030	05024258	30 Stück 5 x 5 x 2 cm steril	○
36815-005	11644692	5x3 Stück je 5 x 5 x 2 cm steril	●

16812-020	11689565	20 Stück 30 x 1,5 x 0,6 cm steril	○
36812-020	11689571	30 Stück 30 x 1,5 x 0,6 cm steril	●
15372-020	11689588	30 Stück 30 x 1,5 x 0,6 cm steril	○

LIGASANO® weiß: Sterile Wundauflagen und Wundeinlagen

15341-010	02496198	10 Stück 5 x 5 x 1 cm steril	○
15342-010	12470490	10 Stück 5 x 5 x 2 cm steril	○
15346-010	01912795	10 Stück 10 x 10 x 1 cm steril	○
15347-010	05024347	10 Stück 10 x 10 x 2 cm steril	○
15350-015	04907346	15 Stück 15 x 10 x 0,5 cm steril	○
15351-010	04907406	10 Stück 15 x 10 x 1 cm steril	○
15356-010	00070934	10 Stück 15 x 10 x 2 cm steril	○
15352-010	03450502	10 Stück 24 x 16 x 1 cm steril	○
15357-005	00073275	5 Stück 24 x 16 x 2 cm steril	○

15370-010	02815893	10 Stück 300 x 2,5 x 0,4 cm steril	○
15371-007	04893590	7 Stück 100 x 1,5 x 0,4 cm steril	○
15372-010	12423036	10 Stück 50 x 1,5 x 0,4 cm steril	○
15375-010	01912826	10 Stück 6 x 2,5 x 0,4 cm steril	○
15385-010	00195854	10 Stück Ø 5 cm x 1 cm steril	○

LIGASANO® weiß: Sterile und unsterile Binden

15381-008	09194483	8 Stück 300 x 5 x 0,3 cm steril	○
15383-004	09194514	4 Stück 300 x 10 x 0,3 cm steril	○
15571-012	02019357	12 Stück 300 x 5 x 0,3 cm unsteril	○
15573-006	02019386	6 Stück 300 x 10 x 0,3 cm unsteril	○

LIGASANO® weiß: Finger- und Zehenverband mit Klebekante

15394-015	12480011	15 Stück 14 x 10 x 0,5 cm T-förmig Zehenschlauch / Zehenkappe steril für Zehendurchmesser von 1,0 bis 3,8 cm	○
15215-001	11529198	1 Stück 200 x 14 x 0,5 cm unsteril gerollt, abschneidbar, mit Kleberand ergibt ca. 40-50 Zehenschläuche	○

Art.-Nr.	PZN	Versandeinheit
----------	-----	----------------

LIGASANO® weiß: Unsteriler Verbandstoff

15152-010	02232890	10 Stück 24 x 16 x 1 cm unsteril	○
15153-005	02232909	5 Stück 24 x 16 x 2 cm unsteril	○
15158-013	02232915	13 Stück 15 x 10 x 2 cm unsteril	○
15159-026	02232938	26 Stück 15 x 10 x 1 cm unsteril	○
15083-025	00195877	25 Stück Ø 3,5 cm x 1 cm unsteril, rund	○
15085-036	00195860	36 Stück Ø 5 cm x 1 cm unsteril, rund	○

LIGASANO® weiß und grün: Große Verbandstoff-Zuschnitte

12001-007	03934370	7 Stück 59 x 49 x 2 cm unsteril	○
12002-014	03934387	14 Stück 59 x 49 x 1 cm unsteril	○
12006-001	03274241	1 Stück 200 x 100 x 2 cm unsteril	○
12007-002	03274258	2 Stück 200 x 100 x 1 cm unsteril	○

LIGASANO® weiß + grün: Innenhandverband

15090-012	07235516	10 Stück 29 x 12 x 1 cm unsteril 2 Stück Ø 8 cm 10 cm breit unsteril	○
15091-010	11269018	10 Stück 29 x 12 x 1 cm unsteril	○

LIGASANO® Roll: Spenderboxen

15025-001	01534270	1 Stück 200 x 2,5 x 1 cm unsteril	○
15225-001	03404933	1 Stück 300 x 2,5 x 0,6 cm unsteril	○
15050-001	07761802	1 Stück 300 x 5,0 x 0,3 cm unsteril	○
15055-001	01551469	1 Stück 200 x 5,5 x 1 cm unsteril	○
15255-001	03404956	1 Stück 300 x 5,5 x 0,6 cm unsteril	○
15110-001	01555065	1 Stück 200 x 11 x 1 cm unsteril	○
15210-001	03404962	1 Stück 300 x 11 x 0,6 cm unsteril	○
16110-001	01570366	1 Stück 200 x 11 x 1 cm unsteril	●

LIGASANO® weiß + grün: Diabetes-Plantarverband

15098-007	11223418	4 Stück 35 x 15 x 1 cm unsteril 1 Stück 35 x 15 x 2 cm unsteril 5 Stück 35 x 15 x 1 cm unsteril 1 Stück 35 x 15 x 2 cm unsteril 1 Stück Fixiertrumpf	○
15099-020	11223401	20 Stück 35 x 15 x 1 cm unsteril Nachkaufpackung	○

LIGASANO® kann sowohl therapeutisch als auch präventiv angewendet werden. Zur Transparenz für den Kostenträger kann daher auf der Verordnung die Indikation angegeben werden. Hier einige Beispiele für Verordnungen zur **therapeutischen Anwendung**, auch abseits der direkten Wundbehandlung

Vorschlag Verordnungstext


Wundbehandlung: Wundreinigung Keimverarmung Förderung der Granulation und Epithelisation	... OP LIGASANO® wegen Dekubitalulcus Stadium ... (2-6) ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris arteriosum ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris venosum ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris mixtum ... OP LIGASANO® wegen diabetisch bedingter Fußläsionen ... OP LIGASANO® zur Wundreinigung ... OP LIGASANO® wegen offener Kratzwunden/Schürfwunden ... OP LIGASANO® wegen Verbrennungen ... OP LIGASANO® zur Aufliegedrainage bei stark sezernierender Wunde ... OP LIGASANO® wegen traumatischer Wunde durch OP LIGASANO® zur postoperativen Versorgung ... OP LIGASANO® wegen Anus praeter
Bettlägerigkeit	... OP LIGASANO® wegen massiver Durchblutungsstörungen im Auflage-/Risikobereich
Intertrigo-Prophylaxe	... OP LIGASANO® wegen adipositasbedingter Intertrigogefahr
Intertrigo-Behandlung	... OP LIGASANO® wegen Intertrigo im ...-Bereich
Pilzinfektionen z.B. in Hautfalten	... OP LIGASANO® zur Begleitbehandlung bei Pilzinfektionen
Arterielle Durchblutungsstörungen	... OP LIGASANO® Binden wegen massiver arterieller Durchblutungsstörungen der Beine
Venöser Rückstau in den Beinen	... OP LIGASANO® Binden zur Unterstützung der Kompressionstherapie
Mazeration	... OP LIGASANO® wegen Hautläsionen durch Mazeration

Weitere therapeutische Anwendungen ergeben sich durch das breite Anwendungsspektrum.

Bitte unbedingt beachten: **LIGASANO® ist kein Hilfsmittel, sondern ein Verbandstoff**, auch bei der Wundbegleitbehandlung und Rezidivprophylaxe. Bitte **keinesfalls Hilfsmittel ankreuzen**, da die GKV die Kosten sonst nicht übernimmt.



Verordnung

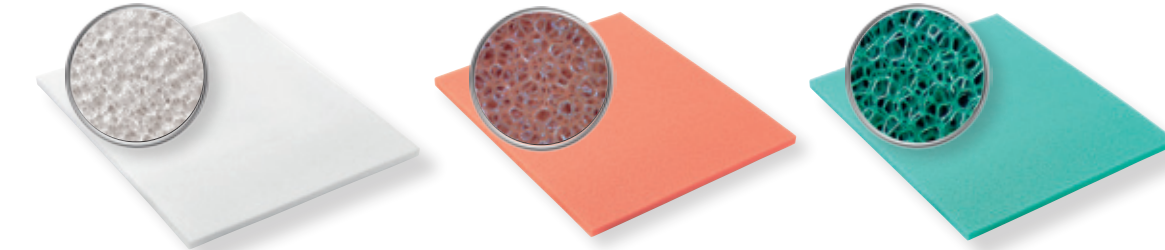

LIGASANO® Produktfamilie

LIGASANO® weiß:

- Gemischtporiges, vergleichsweise grobporiges geschäumtes Polyurethan
- Zelltyp 750

Eigenschaften:

- Schnell nachlassende Druckspannung



- Mechanischer Reiz



- Saugwirkung




LIGASANO® orange:

- Offenporiges, sehr großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen
- Zelltyp 850

Eigenschaften:

- Offenzellige und großporige Struktur
- Mittelstarker mechanischer Reiz
- Fast ungehinderte Wasserdampfpermeabilität

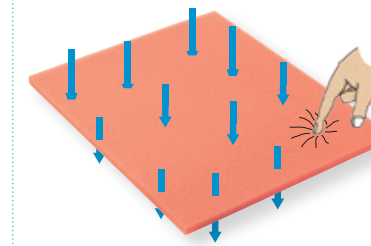


LIGASANO® grün:

- Offenporiges, sehr großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen
- Zelltyp 1500

Eigenschaften:

- Offenzellige und großporige Struktur
- Intensiver mechanischer Reiz
- Fast ungehinderte Wasserdampfpermeabilität

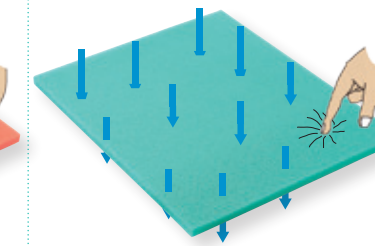

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® orange
- = LIGASANO® grün

LIGASANO®
Wundreinigung - Wundheilung - Rezidivprophylaxe

Wundreinigung

Wundheilung

Rezidivprophylaxe

Verkauf


Das Débridement ist ein zentraler Bestandteil der Wundversorgung. LIGASANO® Wundputzer® sind sterile Wundverbände für einen kurzzeitigen Verbleib auf oder in der Wunde. Die Reinigungswirkung führt schnell zu sauberen Wunden, eine der Voraussetzungen für die Wundheilung.

Je nach Art und Menge der Beläge haben Sie drei verschiedene Wundputzer® zur Auswahl, besonders sinnvoll kann eine Kombination sein. Durch Anwendung der **Drehtechnik** (Drehbewegung um 180°) und/oder der **Wischtechnik** (Auswischen in nur eine Richtung) erhält man mit den LIGASANO® Wundputzern® ein optimales Reinigungsergebnis.

Für schwer erreichbare Stellen gibt es die LIGASANO® Wundputzer® interdigital. Durch die angepasste Form können Sie nun auch im Interdigitalbereich und bei Unterminierungen bzw. Wundtaschen optimale Reinigungsergebnisse erzielen.


LIGASANO® Wundputzer® intensiv

Entfernen sehr hartnäckige, zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können sehr viel Detritus aufnehmen

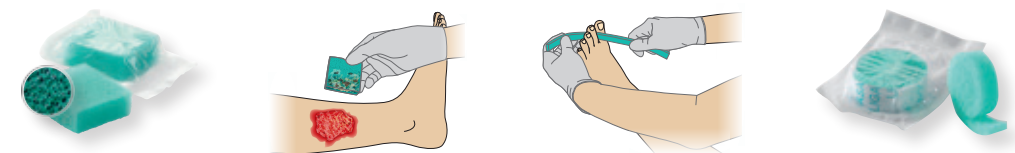


LIGASANO® Wundputzer® interdigital intensiv

Entfernen sehr hartnäckige, zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können sehr viel Detritus aufnehmen

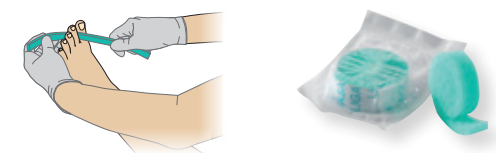


LIGASANO® Wundputzer® medium

Entfernen relativ zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können viel Detritus aufnehmen

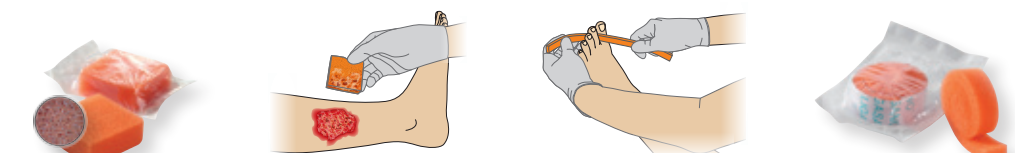


LIGASANO® Wundputzer® interdigital medium

Entfernen relativ zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können viel Detritus aufnehmen

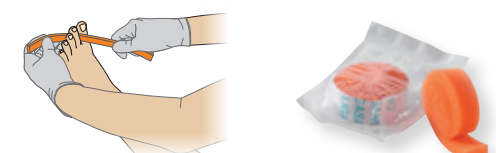


LIGASANO® Wundputzer® soft

Entfernen weiche Beläge und Biofilm

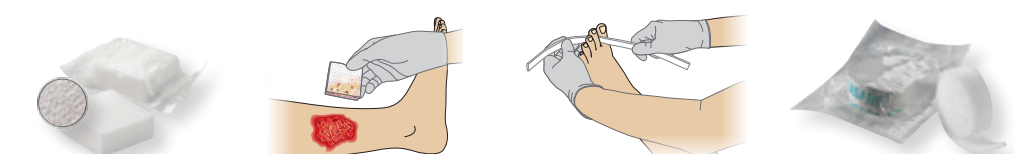

LIGASANO® Wundputzer® interdigital soft

Entfernen weiche Beläge und Biofilm

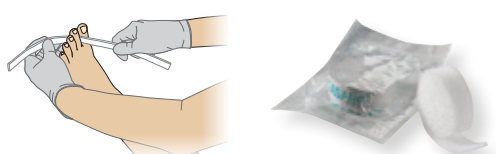

Wundreinigung / Mechanisches Débridement

Die **schnell nachlassende Druckspannung** von LIGASANO® weiß reduziert den Druck auf die Wunde, fördert die Granulation und reduziert den Gegendruck auf das neu gebildete Granulationsgewebe.

Der **mechanische Reiz** (die Struktur des Verbandes wird vom Gewebe wahrgenommen) fördert die Durchblutung und aktiviert die Selbstreinigung.

Da nur überschüssiges Exsudat aufgenommen wird (**kontrollierte Saugwirkung, Exsudatmanagement**), trocknet LIGASANO® weiß die Wunde nicht aus. Je nach Dicke des Materials entsteht ein intermittierender Unterdruck.


Anwendertipps

- Immer vollflächiger Wundkontakt
- LIGASANO® Wundauflege insgesamt mindestens 2cm dick
- Verbandwechsel wie in der Beipackinformation beschrieben

Fixierung

- LIGAMED® fix oder Teile davon
- Netzhörschen, Fixierhörschen, Schlauchverband, etc.
- Luftdurchlässiges Klebepflaster


Flache Wunde (bis ca. 0,5 cm Tiefe)

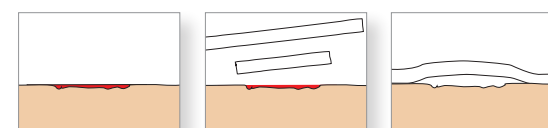


Ulcus cruris venosum




Tiefe Wunde

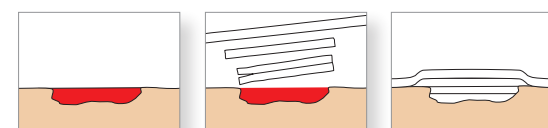

Ulcus cruris arteriosum

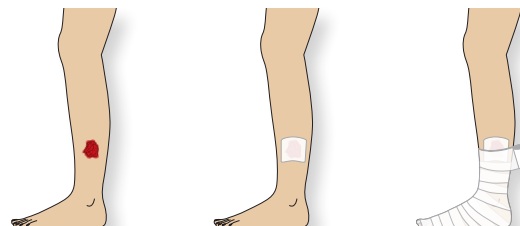

Tiefe Wunde mit Unterminierung

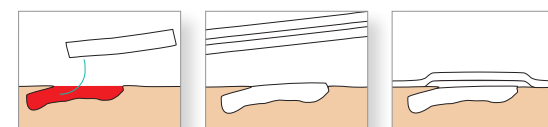

Ulcus cruris mixtum



Tiefe Wunde mit engem Eingang / Fistel




Wundheilung

Die schnell nachlassende Druckspannung von LIGASANO® weiß erlaubt eine nahezu gleichmäßige Verteilung des Auflagedrucks und damit eine Vermeidung der gefürchteten Druckspitzen. LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün lassen sich einfach zuschneiden. So entstehen durch den Einfallsreichtum des Pflegepersonals angepasste Lagerungshilfen wie Rollen, Keile, Fersenschuhe etc.

LIGASANO® weiß fördert im Hautkontakt die periphere Durchblutung, die Druckresistenz des Patienten erhöht sich. Schweiß wird aufgenommen, der Patient hat dadurch eine normale Hautfeuchtigkeit und im Zusammenspiel mit dem mechanischen Reiz auch eine Hautpflege. Der Erhalt des physiologischen Hautmilieus wird durch LIGASANO® weiß unterstützt.

LIGASANO® grün ist luft- und flüssigkeitsdurchlässig wie ein Sieb und verhindert dadurch Wärme- und Feuchtestau. Die ideale Ergänzung zu LIGASANO® weiß.

Beispiel: Individuelle Betauflege / Druckentlastung durch Druckverteilung

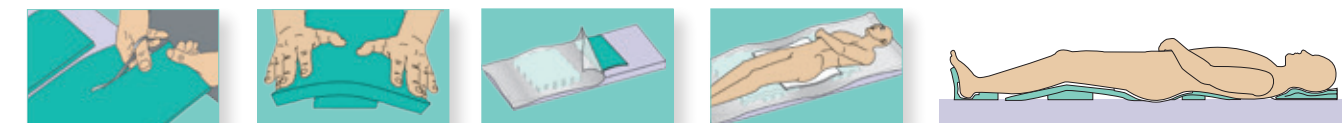


Beispiel: Individueller Fersenschuh



Beispiel: Fersenkappe



Beispiel: Intertrigoprophyllaxe und -therapie

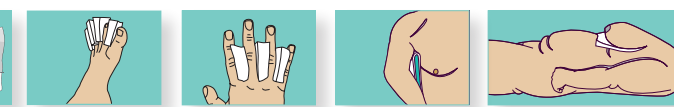

Beispiel: Einfache Handlagerung / Kontrakturprophyllaxe, -therapie



Beispiel: Fingerspreizer / Individueller Innenhandverband bei schlaffer Lähmung



Das sind nur einige Beispiele aus dem breiten Anwendungsspektrum von LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün.

Viele weitere Beispiele finden Sie in unserem Kompendium Wundreinigung - Wundheilung - Rezidivprophyllaxe im Kapitel Prävention.

Rezidivprophyllaxe

In Deutschland erhalten Sie unsere Produkte in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel (Sanitätshaus). Wiederverkäufer können LIGASANO® auch direkt über den Großhandel beziehen. Sollte einmal ein Artikel nicht vorrätig sein, können Sie versandkostenfrei auch direkt bei uns bestellen, das bestellte Produkt ist dann meist am nächsten bzw. spätestens am übernächsten Werktag bei Ihnen.

Sie erreichen uns persönlich Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 16.00 und Freitag von 08.00 bis 12.00. Außerhalb unserer Geschäftszeiten bitten wir Sie, uns Ihre Nachricht auf Band zu sprechen oder eine E-Mail zu senden.


Gerne beliefern wir Sie auch weltweit. Die entstehenden Transportkosten teilen wir Ihnen nach Anfrage mit. Da diese je nach Paketgröße, Paketgewicht und Land variieren, können wir Ihnen die tatsächlichen Kosten erst im Zusammenhang mit einer konkreten Bestellmenge mitteilen.

LIGAMED® medical Produkte GmbH
Pfannenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: info@ligamed.de

www.ligasano.com

Das Copyright für alle Texte, Zeichnungen und Abbildungen in dieser Broschüre liegt bei der LIGAMED® medical Produkte GmbH in D-90556 Cadolzburg.

LIGASANO®
wirkt einfach

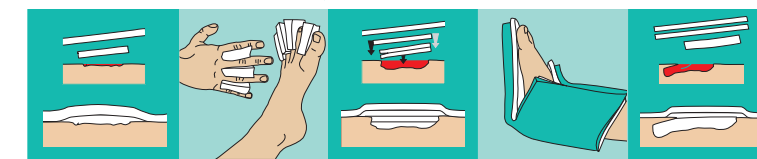

Info 02/041 Stand Mai 2019